

# Dipslide

## Vorbereiding

### Klaarleggen materialen:

- niet-steriele handschoenen
- dipslide
- broedstoof

## Toelichting

### Vorbereiding

- Geef de patiënt een schoon, nieuw potje om de urine in op te vangen.
- Zorg voor naam en geboortedatum op het potje.
- Verzoek om een nieuw, vers urinemonster, niet ouder dan 2 uur, bewaar anders gekoeld maximaal 24 uur.
- Trek handschoenen aan.

### Toelichting

- Dompel de dipslide helemaal onder in de urine.
- Haal de dipslide er uit, laat uitlekken met de onderkant tegen tissue.
- Doe de dipslide in het bijbehorende buisje en sluit het buisje af.
- Plaats het buisje in de broedstoof (38°) of bewaar de dipslide op kamertemperatuur (20°).
- Lees af na ten minste 18 uur op 38° of na ten minste 24 uur op 20°.
- Lees eerst de groene kant af (CLED): vergelijk het groeibeeld met de referentiekaart.
- Lees daarna de rode kant af (MacConkey): vergelijk weer met de referentiekaart.

# Dipslide

## Nazorg

### Voorlichten

- Groene kant: er is sprake van een urineweginfectie dus een positieve test bij  $\geq 10^4$  kolonievormende eenheden per ml.
- Rode kant: bij een positieve test is er sprake van een gramnegatieve verwekker.
- Behandel bij een positieve test volgens de NHG-Standaard.

## Literatuur

- In 't Veld CJ, Goudswaard AN, Dijkstra RF. Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012.
- Van Pinxteren B, Knottnerus BJ, Geerlings SE, Visser HS, Klinkhamer S, Van der Weele GM, Verduijn MM, Opstelten W, Burgers JS, Van Asselt KM. NHG-Standaard Urineweginfecties. Huisarts Wet 2013;56(6):270-80.